



Suu limaskestest kaape võtmise juhend

1. Ärge andke koerale 1-2 h süüa.
2. Samal ajal vaadake, et koer ei lakuks ega puutuks kokku teiste koertega
3. **Peske oma käed seebiga!** Ei ole küll kohustus aga võimalusel kandke ka kummikindaid.
4. Võtke tampoon katsutist välja. **Ärge katsuge tamponi vatist otsa oma sõrmedega!**
5. DNA proovi võtmiseks hõõruge tamponi tugevalt 1 minuti jooksul vastu koera sisepõske (suu limaskest)! **Oluline on mitte hõõruda suurt ala, vaid keskenduma peab ühele konkreetsele alale!**
6. **Kuivatage tamponi 20min õhu käes.** Asetage tampoon tagasi katsutisse. Ärge katsuge tamponi vatist otsa oma näppudega.
7. Sulgege katsuti. Kirjutage katsutile DNA proovi võtmise kuupäev. Seejärel pakkige katsutid ümbrikusse ja saatke need tagasi Vetgeeni laborisse.

Kui soovite väljastatavale sertifikaadile ka proovi võtva veterinaari nime (kes kinnitab proovi ja kiibinumbriga kokkulangevust), saatke koos proovidega laborisse tagasi vabas vormis veterinaari poolt allkirjastatud tõend.

Kui Teil ei ole võimalik kogutud DNA proovi koheselt Vetgeeni laborisse saata, võib kogutud DNA-ga katsutit säilitada sügavkülmas -18 C⁰ juures kuni 7 päeva!

Labori postiaadress:

Tartu Ülikool, Arstiteaduskond
Ravila 14B, Tartu, Eesti, 50411
Kontaktisik Maarja Toots
e-mail: maarja@vetgeen.ee

Vetgeeni klienditugi
e-mail: info@vetgeen.ee
www.vetgeen.ee